


INneo Anpassung: Der traditionelle Weg mit Anpasslinse

START: Aufsetzen der Anpasslinse.

Setzen Sie die Anpasslinse auf und warten Sie bis zur Beurteilung ca. 10 Minuten.

SCHRITT 1: Beurteilung des Gesamtdurchmessers der Anpasslinse.

Beurteilen Sie den Gesamtdurchmesser beim Blick geradeaus.
Die ideale Grösse ist ca. 2 mm grösser als der Durchmesser der Cornea.

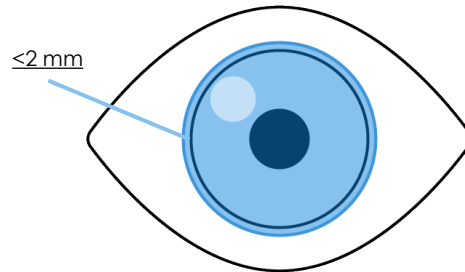


Durchmesser zu klein



INneo Durchmesser


Large

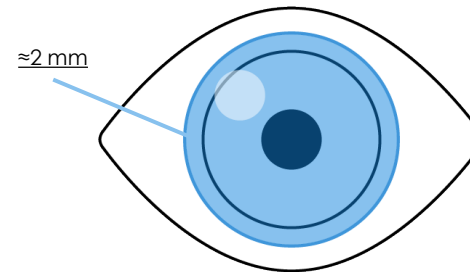

Durchmesser ideal



Standard

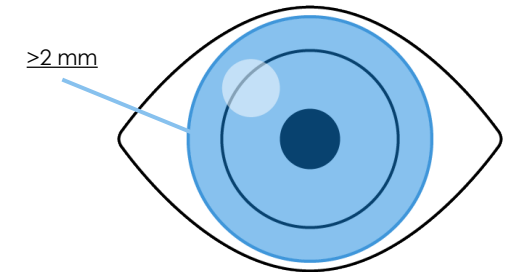


Durchmesser zu gross



Small

SCHRITT 2: Beurteilung der Bewegung und Zentrierung der Anpasslinse.

Beurteilen Sie die Bewegung und Zentrierung beim Blick geradeaus und Blinzeln, anschliessend bei Aufblick und Blinzeln und bei Rechts-Links-Blick.
Die Linse sollte sich ca. 0.5 bis 1 mm bewegen und zentrieren.

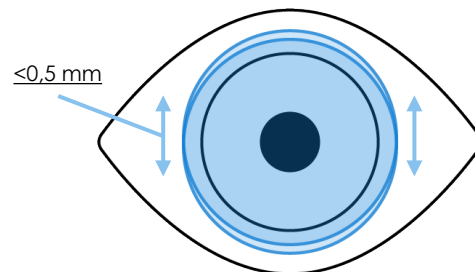


Bewegung zu gering



INneo Basiskurve


Flat

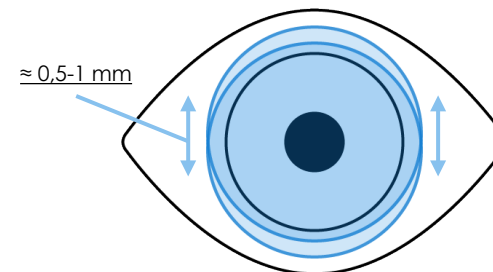

Bewegung ideal



Standard

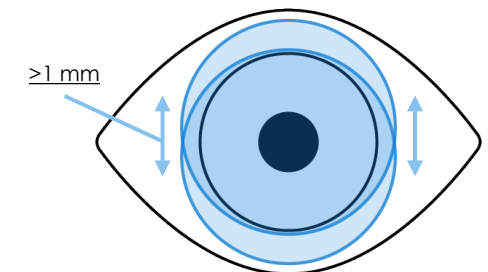

Zu viel Bewegung



Steep

Beachten Sie: Bei Änderung des Durchmessers muss die Basiskurve NICHT verändert werden, um ein identisches Sitzverhalten zu erhalten